

Referencias de control

Reactivos

REF		CONT
A1DGX-B00	Universal especial	1 x 15 ml R1 + 1 x 15 ml R2
A1DGX-H00	Universal especial	2 x 25 ml R1 + 2 x 25 ml R2
A1DGX-L00	Universal especial	12 x 25 ml R1 + 12 x 25 ml R2

Otros productos necesarios

REF		CONT
A1REK-000	Conjunto de Calibradores de Alpha1-Microglobulina (5 Niveles)	5 x 1 ml
A1COS-002	Control de Alpha1-Microglobulina Bajo	1 x 2 ml
A1CON-002	Control de Alpha1-Microglobulina	1 x 2 ml

Ámbito de uso – Destino

Reactivo de diagnóstico in vitro para la determinación cuantitativa de la alfa 1 microglobulina en muestras de origen humano por inmunturbidimetría en sistemas fotométricos.

Interés médico - Validez científica

La alfa 1 microglobulina (α 1-M), denominada también proteína HC (human complex forming protein) es una pequeña glicoproteína globular de bajo peso molecular (33 kDa). Su concentración fisiológica en la orina es muy baja. Es una de las proteínas con una presencia más constante en la orina en caso de daño tubular. Se filtra a través del glomérulo para reabsorberse casi en su totalidad por el tubo proximal, donde se degradará. Debido a su sensibilidad y estabilidad en la orina, incluso ácida, es un importante marcador precoz para el diagnóstico de las lesiones tubulares en casos de nefritis, nefropatías diabéticas avanzadas, tras la administración de medicación nefrotóxica o incluso tras la exposición a metales pesados.

Principio del método

Las partículas de látex en forma coloidal se estabilizan con la ayuda de anticuerpos contra la alfa 1 microglobulina dirigidos específicamente contra la alfa 1 microglobulina. La reacción de estas partículas con la alfa 1 microglobulina presente en una muestra biológica provoca la aglutinación específica de las partículas de látex. Esta aglutinación, directamente proporcional a la concentración de alfa 1 microglobulina de la muestra, se lee a 340 nm y 700 nm.

Advertencias y precauciones de uso

- Para uso diagnóstico in vitro únicamente.
- La manipulación debe llevarla a cabo el personal autorizado bajo la responsabilidad de un biólogo.
- Los productos de origen humano se han sometido a una detección negativa de anticuerpos anti-VIH 1 y 2, anticuerpos anti-VHC y Ag HBs, pero se deben manipular como productos potencialmente infecciosos.
- Estos productos contienen azida de sodio. Los productos con azida de sodio deben manipularse con precaución: es necesario evitar la ingestión y el contacto con la piel o las membranas mucosas.
- La azida de sodio se vuelve explosiva en contacto con metales pesados como el cobre o el plomo.

Muestras

Condiciones de la recogida

Obtenga las muestras siguiendo las técnicas convencionales de laboratorio y utilice únicamente para ello los procedimientos, tubos o recipientes de recogida adecuados.

Tipo de muestra

Orina.

Conservación y estabilidad de las muestras

Temperatura	Estabilidad
- 20 °C	≤ 6 meses
2 - 8 °C	≤ 4 semanas
15 - 25 °C	≤ 7 días

Esta información proviene de los datos de «Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests» y de la «WHO».

Reactivos

Composición y concentraciones/Conservación

Componentes activos:

Reactivo R1: ninguno.

Reactivo R2: Suspensión de partículas de látex coloidales recubiertas con anticuerpos (conejo) anti alfa 1 microglobulina humana.

Otros componentes:

Reactivo R1: tampón, estabilizante, sal inorgánica y conservantes.

Reactivo R2: tampón, estabilizante, poliestireno, sal inorgánica y conservantes.

Temperatura de conservación:

Reactivo R1: 2-8 °C.

Reactivo R2: 2-8 °C.

Preparación

Listos para usar.

Conservación y estabilidad

Los reactivos permanecen estables hasta la fecha de caducidad indicada en el embalaje (mes anterior) en las condiciones de conservación y manipulación que se recomiendan a continuación:

- Frasco sin abrir conservado a la temperatura indicada en el embalaje.
- Frasco abierto: se vuelve a cerrar después del uso o se coloca en el analizador cerrado previsto a tal efecto, no contaminado por la manipulación y conservado a la temperatura indicada en el embalaje.

Nota:

- No congele los reactivos.
- Los reactivos con nanopartículas pueden sedimentarse con el tiempo. Puede ser necesario homogeneizarlos cuidadosamente girándolos varias veces seguidas.

Otros materiales necesarios

Equipo habitual de laboratorio con un sistema analítico que cuente con un detector fotométrico.

Calibración

Equilibrado

La curva de calibración se realiza con el kit de calibración que se indica en la sección «Referencias de control». El punto cero de la curva de calibración se efectúa con suero fisiológico.

Trazabilidad

El método se ha estandarizado con respecto a un método de referencia incluido en la norma internacional, tal como se describe en la ficha técnica de los calibradores relacionados (consulte el apartado «Referencias de control»).

El método se debe calibrar cuando cambia el número de lote del reactivo o en caso de alteración de los resultados (contacte con el fabricante si persisten las alteraciones) o si así lo exige el control de calidad.

Control de calidad

La frecuencia de los controles y de los límites de confianza debe adaptarse a las exigencias del laboratorio. Los resultados deben quedar comprendidos dentro de los límites de confianza definidos. Cada laboratorio deberá establecer el procedimiento que hay que seguir si los resultados quedan fuera de los límites definidos. Es obligatorio cumplir con la legislación del país y las directivas locales vigentes en materia de control de calidad.

La curva de calibración y su estabilidad pueden validarse utilizando los materiales de los controles que figuran en la sección «Referencias de control».

Valores de referencia

	Valores de referencia
Persona sana	≤ 12 mg/l en orinas procedentes de la segunda micción de la mañana

Unidades internacionales: mg/L

Unidades convencionales: mg/dL

Esta información proviene de los datos de «Clinical guide to laboratory tests». Cada laboratorio deberá verificar la validez de sus valores y, en caso necesario, establecer sus propios valores de referencia conforme a la población examinada.

Resultados analíticos

Los resultados analíticos que se muestran a continuación se dan a título informativo. Pueden ser diferentes de los resultados obtenidos en el laboratorio.

Los rendimientos analíticos se han determinado siguiendo las indicaciones del «Guide technique d'accréditation de vérification (Portée A)/validation (Portée B) des méthodes en biologie médicale»; document SH GTA 04 Révision 01.

Intervalo de medición

1,29 - 166,6 mg/L

El intervalo de medición está restringido por el límite de cuantificación y el límite de linealidad. Las muestras que tengan una concentración mayor que el límite superior deben diluirse.

Límite de detección

0,46 mg/L

Se trata de la señal más pequeña expresada en una cantidad o concentración que puede distinguirse con una probabilidad determinada de un blanco reactivo realizado en las mismas condiciones.

El estudio del límite de detección se basa en el análisis estadístico de la diferencia de las señales observadas entre los blancos y las muestras.

Interferencias (especificidad analítica)

No hay ninguna reacción cruzada conocida con el antisuero citado ni los anticuerpos que se utilizan.

Las muestras que presenten una coloración anómala y contengan partículas pueden generar errores de medición, en función del sistema analítico. Estas muestras deben aclararse químicamente o físicamente antes de su determinación.

Precisión

La precisión se evaluará con ayuda de la repetibilidad (CV intraserie) y la fidelidad intermedia (CV interserie).

	Repetibilidad (n = 30)		Reproducibilidad (n = 30)	
	Media (mg/L)	CV (%)	Media (mg/L)	CV (%)
Nivel 1	3,88	1,0	3,89	3,6
Nivel 2	19,28	0,5	18,95	1,2
Nivel 3	35,95	0,7	36,69	4,0

Exactitud

La exactitud, cuantificada por el sesgo, se calcula comparando la media obtenida en el estudio de la fidelidad intermedia, establecida con las muestras de CIC, con el valor objetivo esperado, asimilada al valor «real» de la muestra analizada.

La exactitud se define como la cercanía de un valor medido a un valor real de un mensurando (magnitud que se quiere medir).

Diagam autoriza un sesgo del 5 % con respecto a la norma internacional o con respecto a un método de referencia incluido en la norma internacional, si lo hay.

Limitaciones del método

Los resultados de esta prueba deben interpretarse siempre en relación con los antecedentes médicos del paciente, los signos clínicos y otros hallazgos.

Prozona

Limitando la linealidad del valor del límite superior del intervalo de medición, no se ha observado ningún efecto de exceso de antígeno en las muestras con una concentración de hasta 697,6 mg/L.

Efecto de matriz

Las muestras de los controles interlaboratorio y de los controles pueden dar resultados diferentes a los obtenidos con otros métodos de medición debido al efecto de matriz. En este caso, podría ser necesario llevar a cabo un análisis de los resultados en función de los valores objetivo específicos del método utilizado. En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante.

Procedimiento de uso







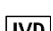


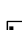
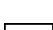

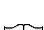

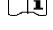

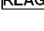
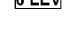
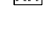


Bibliografía


1. Tietz Textbook of Clinical chemistry and molecular Diagnostics, fourth edition, edited by Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood, David E. Bruns, 2006
2. Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations & Stability of blood, plasma and serum samples. Publication WHO/DIL/LAB/99.1 Rev. 2. Jan. 2002.
3. Clinical guide to laboratory tests, second edition, edited by Norbert W. Tietz, 1990
4. CLSI. Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition. CLSI document H3-A6 (ISBN 1-56238-650-6). CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA; 2007.

5. NCCLS. Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard-Fifth Edition. NCCLS document H4-A5 [ISBN 1-56238-538-0]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA, 2004.

Leyenda de los símbolos

Los símbolos siguientes pueden figurar en el envasado y en la etiqueta:

	Código de lote		Amortiguador
	Utilizar antes de		Calibrador
	Fabricante		Elevado
	Producto sanitario para diagnóstico in vitro		Medio
	Temperatura (conservación)		Bajo
	Referencia del catálogo		4 niveles
	Consulte las instrucciones de uso		5 niveles
	Reactivo		6 niveles
	Conjunto		Control
	Contenido		Este producto cumple los requisitos de la Directiva europea 98/79 CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro
	Anticuerpo o antisuero		

	DiAgam Belgium: Rue du Parc Industriel 40, 7822 Ghislenghien, Belgium
DiAgam Headquarters	Avenue Louis Lepoutre 70, 1050 Bruxelles, Belgique
Distributed by	DiAgam France: Boulevard de la Liberté 130, 59000 Lille, France

All product names, registered trademarks, company names in this document remain the property of their respective owners.