

Referências para encomenda

Reagentes

REF		CONT
IGLCR-B00	<i>Universal dedicado</i>	1 x 50 ml R1 + 1 x 9 ml R2
IGLCR-H00	<i>Universal dedicado</i>	2 x 50 ml R1 + 2 x 9 ml R2

Outros produtos necessários

REF		CONT
IGREK-000	<i>Kit de Calibradores de CSF IgG (5 Níveis)</i>	5 x 1 ml
IGCOS-002	<i>Controlo de CSF IgG Baixo</i>	1 x 2 ml
IGCON-002	<i>Controlo de CSF IgG Médio</i>	1 x 2 ml
IGCOX-002	<i>Controlo de CSF IgG Alto</i>	1 x 2 ml

Campo de utilização – Destino

Reagente de diagnóstico in vitro para a determinação quantitativa da IgG no líquido cefalorraquidiano em amostras de origem humana por imunoturbidimetria em sistemas fotométricos.

Interesse clínico – Validade científica

No líquido cefalorraquidiano (LCR), as imunoglobulinas estão normalmente presentes em pequenas quantidades. A elevação dos níveis de IgG no LCR pode ser observada em infeções do sistema nervoso central (SNC), uma síndrome inflamatória ou em condições neurológicas, como a esclerose múltipla.

Uma concentração elevada de IgG no LCR pode ser devida a dano hemato-meníngeo e/ou à síntese de IgG intratecal. Os ensaios paralelos de albumina e IgG no soro e no LCR permitem diferenciar entre estes dois mecanismos e demonstrar uma síntese intratecal de IgG.

Princípio do método

A IgG no líquido cefalorraquidiano existente na amostra a dosear reage especificamente com um antissoro anti-IgG no líquido cefalorraquidiano humana e a turbidez induzida pela formação do complexo imune antígeno-anticorpo é medida a 570 nm e 800 nm. A turbidez medida é proporcional à concentração em IgG no líquido cefalorraquidiano da amostra.

Advertências e precauções de utilização

- Exclusivamente para diagnóstico in vitro.
- Deve ser manipulado por pessoal habilitado sob a responsabilidade de um biólogo.
- Os produtos de origem humana foram submetidos a um rastreio negativo relativamente a anticorpos anti-VIH 1 e 2, anticorpos anti-VHC e antígeno HBs, mas devem, no entanto, ser manipulados como produtos potencialmente infecciosos.
- Estes produtos contêm azida de sódio. Os produtos que contêm azida de sódio devem ser manipulados com precaução: evitar a ingestão e o contacto com a pele ou as mucosas.
- A azida de sódio torna-se explosiva ao contacto com metais pesados como o cobre ou o chumbo.

Amostras

Condições de colheita

Colher as amostras segundo as técnicas laboratoriais clássicas e, por conseguinte, utilizar apenas os procedimentos, os tubos ou os recipientes de colheita apropriados.

Tipo de amostra

Líquido cefalorraquidiano

Conservação e estabilidade das amostras

Temperatura	Estabilidade
- 70 °C	Indefinidamente
- 20 °C	≤ 6 meses
4 °C	≤ 72 horas

As presentes informações proveem de dados fornecidos por "Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests" e por "WHO".

Reagentes

Composição e concentrações/Conservação

Componentes ativos:

Reagente R1: nenhum.

Reagente R2: antissoro de cabra anti-imunoglobulinas G humana (título ± 21,9 mg / ml).

Outros componentes:

Reagente R1: tampão, polímero, sal inorgânico e conservante.

Reagente R2: tampão, sal inorgânico e conservante.

Temperatura de armazenamento:

Reagente R1: 2 - 25 °C.

Reagente R2: 2 - 8 °C.

Preparação

Prontos a utilizar.

Conservação e estabilidade

Os reagentes são estáveis até ao prazo de validade indicado na embalagem (mês completo), nas condições de conservação e de manipulação recomendadas a seguir indicadas:

- Frasco não aberto conservado à temperatura indicada na embalagem.
- Frasco aberto: fechar após utilização ou colocar no analisador fechado para este efeito, não contaminado pela manipulação e conservado à temperatura indicada na embalagem.

Nota:

- Não congelar os reagentes.
- Os reagentes à base de nanopartículas podem sedimentar com o passar do tempo. Pode ser necessário homogeneizá-los suavemente fazendo girar o frasco várias vezes.

Outros materiais necessários

Equipamento laboratorial habitual, tal como um sistema analítico equipado com um detetor fotométrico.

Calibração

Aferição

A curva de calibração é traçada utilizando o kit de calibração indicado na secção “Referência para encomenda”. O ponto zero da curva de calibração é obtido com soro fisiológico.

Rastreabilidade

O método foi padronizado relativamente a um método de referência rastreável ao padrão internacional, tal como descrito na ficha técnica dos calibradores associados (ver secção “Referências para encomenda”).

Calibrar o método quando o número de lote do reagente muda ou em caso de modificação dos desempenhos (contactar o fabricante se as modificações subsistirem) ou quando o controlo da qualidade assim o exigir.

Controlo de qualidade

A frequência dos controlos e os limites de confiança devem ser adaptados às exigências do laboratório. Os resultados devem situar-se dentro dos limites de confiança definidos. Cada laboratório deve estabelecer o procedimento a seguir caso os resultados se situem fora dos limites definidos. Cumprir a legislação nacional e as diretivas locais em vigor em matéria de controlo de qualidade.

A curva de calibração e a sua estabilidade devem ser validadas utilizando os materiais de controlo indicados na secção “Referências para encomenda”.

Valores de referência

	Valores de referência
15 - 20 anos	≤ 35 mg/L
21 - 40 anos	≤ 42 mg/L
41 - 60 anos	≤ 47 mg/L
61-87 anos	≤ 58 mg/L

Unidades internacionais: mg/L

Unidades convencionais: mg/dL

As presentes informações proveem de dados fornecidos por “Clinical guide to laboratory tests”. Cada laboratório deve verificar a validade dos seus valores e estabelecer, conforme necessário, os seus próprios valores de referência de acordo com a população analisada.

Desempenhos analíticos

Os desempenhos analíticos aqui indicados são fornecidos a título indicativo. Os resultados obtidos pelo laboratório podem diferir destes valores.

Os desempenhos analíticos foram determinados seguindo as indicações de “Guide technique d’accreditation de vérification (Portée A)/validation (Portée B) des méthodes en biologie médicale”; document SH GTA 04 Révision 01.

Intervalo de medição

3,375 - 249,78 mg/L

O intervalo de medição é fixado pelo limite de quantificação e pelo limite de linearidade. As amostras com uma concentração superior ao limite superior devem ser diluídas.

Limite de deteção

1,222 mg/L

Trata-se do sinal mais pequeno expresso em quantidade ou concentração que pode ser distinguido com determinada probabilidade de um branco realizado nas mesmas condições.

O estudo do limite de deteção baseia-se na análise estatística da diferença de sinais observada entre os brancos e as amostras.

Interferências (especificidade analítica)

Não existe qualquer reação cruzada conhecida do antissoro ou dos anticorpos utilizados.

As amostras com coloração anormal e com partículas podem causar, conforme o sistema analítico, erros de doseamento. Estas amostras devem ser clarificadas química ou fisicamente antes do doseamento.

Precisão

A precisão é avaliada recorrendo à repetibilidade (CV dentro de uma série) e à fidelidade intermediária (CV entre séries).

	Repetibilidade (n=30)		Reprodutibilidade (n=30)	
	Média (mg/L)	CV (%)	Média (mg/L)	CV (%)
Nível 1	14,37	1,4	13,9	5,3
Nível 2	51,68	0,7	52,33	1,5
Nível 3	101,15	0,5	101,02	1,4

Justeza – Exatidão

A justeza, quantificada pelo viés, é calculada comparando a média obtida no estudo de fidelidade intermediária, estabelecida com amostras de CQI, com o valor-alvo esperado, assimilado ao valor “verdadeiro” da amostra testada.

A exatidão é definida como a estreiteza da concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro de um mensurando (grandeza que se pretende medir).

A DiAgam autoriza um viés de 5% em relação ao padrão internacional ou a um método de referência rastreável ao padrão internacional, caso exista.

Limites do método

Os resultados deste teste devem ser sempre interpretados em função dos antecedentes clínicos do doente, os sinais clínicos e outras constatações.

Prozona

Ao limitar a linearidade ao valor do limite superior do intervalo de medição, não foi observado qualquer efeito do excesso de antigénio para amostras com uma concentração até 5970 mg/L.

Efeito de matriz

As amostras de controlos interlaboratoriais e de controlos podem dar resultados diferentes dos obtidos com outros métodos de doseamento, devido ao efeito de matriz. Nesse caso, poderá ser necessária uma análise dos resultados em função dos valores-alvo específicos do método utilizado. Em caso de dúvida, contactar o fabricante.

Procedimento de utilização







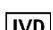

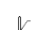


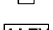
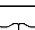
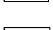
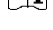

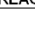
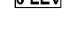


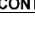
Bibliografia


1. Tietz Textbook of Clinical chemistry and molecular Diagnostics, fourth edition, edited by Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood, David E. Bruns, 2006
2. Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations & Stability of blood, plasma and serum samples. Publication WHO/DIL/LAB/99.1 Rev. 2. Jan. 2002.
3. Clinical guide to laboratory tests, second edition, edited by Norbert W. Tietz, 1990
4. CLSI. Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition. CLSI document H3-A6 (ISBN 1-56238-650-6). CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA; 2007.

5. NCCLS. Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard-Fifth Edition. NCCLS document H4-A5 [ISBN 1-56238-538-0]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA, 2004.

Legenda dos símbolos

Os símbolos seguintes são suscetíveis de figurar no acondicionamento e no rótulo:

 LOT	<i>Número de lote</i>	 BUF	<i>Tampão</i>
	<i>Utilizar até</i>	 CAL	<i>Calibrador</i>
	<i>Fabricante</i>	 H	<i>Elevado</i>
 IVD	<i>Dispositivo médico de diagnóstico in vitro</i>	 M	<i>Médio</i>
	<i>Temperatura (Conservação a)</i>	 L	<i>Baixo</i>
 REF	<i>Referência</i>	 4 LEV	<i>4 níveis</i>
	<i>Consultar as instruções de utilização</i>	 5 LEV	<i>5 níveis</i>
 REAG	<i>Reagente</i>	 6 LEV	<i>6 níveis</i>
 KIT	<i>Kit</i>	 CONTROL	<i>Controlo</i>
 CONT	<i>Conteúdo</i>		<i>Este produto está conforme com a Diretiva Europeia n.º 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro</i>
 Ab	<i>Anticorpos ou Antissoro</i>		

 <i>DiAgam Headquarters</i> <i>Distributed by</i>	<i>DiAgam Belgium: Rue du Parc Industriel 40, 7822 Ghislenghien, Belgium</i> <i>Avenue Louis Lepoutre 70, 1050 Bruxelles, Belgique</i> <i>DiAgam France: Boulevard de la Liberté 130, 59000 Lille, France</i>
--	---

All product names, registered trademarks, company names in this document remain the property of their respective owners.